

Sol - M™ Agulha para Aspiração (Ponta Romba)




LINHA DE INJEÇÃO

Projetada para prevenção de acidentes com agulhas.

A SOL-Millennium leva ao profissional da saúde o conforto necessário para trabalhar em todas as situações do dia a dia. Os produtos são desenvolvidos com a mais alta tecnologia, para facilitar o trabalho e proporcionar segurança.

A Agulha para Aspiração foi projetada para aspirar, preparar e reconstituir medicamentos. Substitui as agulhas trifacetadas tradicionais, reduzindo o risco de acidentes com perfurocortantes.

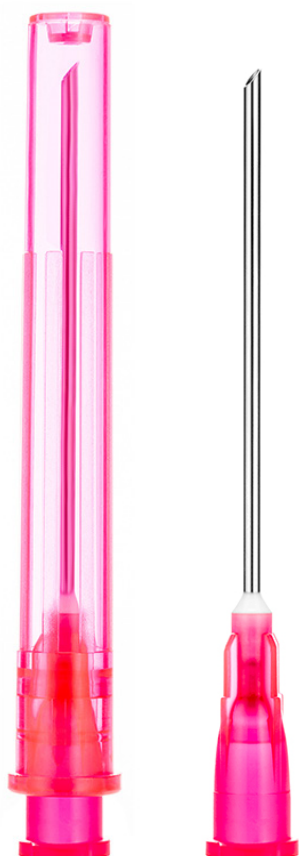

Ponta Romba

- O Bisel arredondado penetra na borracha do frasco ampola, impedindo sua fragmentação.
- Ideal para perfuração do frasco ampola e limpeza de ferimentos em curativos.

Agulha Lubrificada

- Facilita a introdução da cânula no frasco ampola.

Padrão Universal de Cores

- Embalagem, canhão e tampa da agulha estão codificados pelo padrão universal de cores para facilitar a identificação rápida do calibre (gauge) da agulha na cor pink.

Segurança

- Segurança na aspiração e reconstituição de medicação.
- Reduz o risco de acidentes com perfurocortantes.
- Eliminação da utilização desnecessária de material perfurocortante.


Tamanho

- Disponível nos tamanhos: 25 x 1.2 mm e 40 x 1.2 mm.

Agulha para aspiração e diluição Medicamentos de: 25 x 1.2 mm e 40 x 1.2 mm

Reduz o risco de acidentes com perfurocortantes em conformidade com a norma NR 32.

O tamanho 40 x 1.2 mm é ideal para frascos maiores, pois permite encostar a ponta da agulha na parede do frasco ampola, eliminando a formação de "espuma" na medicação, ocasionada pelo jato do diluente direto no pó.

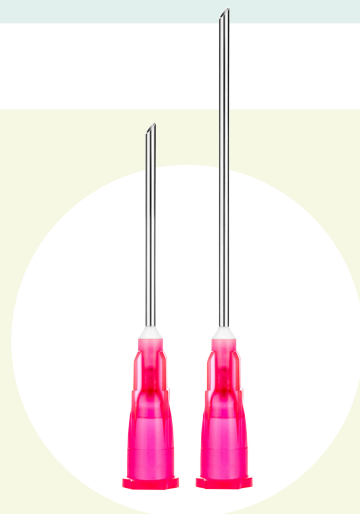

Sol - M™ Agulha para Aspiração (Ponta Romba)

Tampa na cor pink

- ✓ A tampa na cor pink indica que a agulha conectada na seringa é de aspiração de medicamentos, no diâmetro 25 x 1.2 mm e 40 x 1.2 mm, evitando o uso inadequado de uma agulha calibrosa.
- ✓ Ajuda na rápida dispensação da farmácia.



Instruções de uso

- 1 Abrir a embalagem da agulha em pétala e conectar na seringa.
- 2 Remover a tampa protetora.
- 3 Realizar assepsia do frasco ampola.
- 4 Inserir a agulha no centro da borracha do frasco ampola em um **ângulo de 90°**.
- 5 Inverter o frasco e aspirar a medicação.
- 6 Com a medicação preparada e aspirada na seringa, realizar o procedimento.
- 7 Após o uso, descartar o frasco e a agulha em um recipiente apropriado.



Código

Descrição

Gauge

Tamanho/Cor

Unid.
P/Caixa

Unid.
P/Caixa de
Embarque

110021B

SOL-M Agulha Hipodérmica

18G 1"

25 x 1.2 mm

100

1000

110022B

SOL-M Agulha Hipodérmica

18G 1 1/2"

40 x 1.2 mm

100

1000

Para mais informações entre em contato com:

📍 São Paulo/SP
Rua Alvorada, 1289
Cj 1004/1005
Vila Olímpia

📍 Ribeirão Preto/SP
Rua Raphael Andreolli, 850
Distrito Empresarial,
Pref. Luiz Roberto Jabali

☎ +55 11 3044 1183

☎ +55 16 3442 1454

@ vendas02@sol-m.com

@ vendas@sol-m.com